

## CSL Behring

Le 18 janvier 2010

**\*\*\* IMPORTANT \*\*\***

Le respect d'une asepsie rigoureuse doit être assuré en tout temps. CSL Behring décline toute responsabilité relativement à une contamination du produit ou à quelque perte ou dommage que ce soit découlant d'une perte d'aspiration lors de l'emploi du dispositif Mix2Vial<sup>MC</sup>.

**Procédure recommandée pour la reconstitution du produit  
à la suite d'une perte d'aspiration lors de l'emploi  
du dispositif Mix2Vial<sup>MC</sup>**

**Matériel nécessaire :**

Seringue de taille appropriée (10 ou 20 cc)  
2 tampons antiseptiques

1. Saisir chacune des composantes du dispositif Mix2Vial<sup>MC</sup> par le rebord externe.
2. Dévisser les composantes dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour séparer les deux flacons.
3. Placer les flacons sur une surface ou un comptoir propre.
4. Détacher délicatement l'adaptateur bleu du dispositif Mix2Vial<sup>MC</sup> du flacon de diluant et le jeter.
5. Désinfecter le bouchon de caoutchouc du flacon de diluant à l'aide d'un tampon antiseptique.
6. Sans toucher l'embout blanc de type Luer-Lock, y fixer une seringue stérile et serrer fermement. Retirer l'adaptateur transparent du dispositif Mix2Vial<sup>MC</sup> du flacon du produit (y compris la seringue fixée) en respectant une asepsie rigoureuse.
7. Désinfecter le bouchon de caoutchouc du flacon du produit à l'aide d'un tampon antiseptique.
8. Tirer sur le piston de la seringue pour aspirer un volume d'air équivalent à la quantité de diluant restante dans le flacon de diluant et injecter l'air dans ce flacon.
9. Inverser le flacon et aspirer la part restante de diluant dans la seringue.
10. Retirer l'adaptateur transparent du dispositif Mix2Vial<sup>MC</sup> muni de la seringue du flacon de diluant.
11. Placer l'adaptateur transparent muni de la seringue renfermant le diluant sur le flacon du produit.
12. Injecter doucement le diluant dans le flacon du produit, puis procéder de la façon habituelle.

## CSL Behring

Pour toute information additionnelle ou pour obtenir une démonstration de la procédure par un représentant, communiquer avec CSL Behring au 1-866-773-7721 ou consulter leur site Web [www.cslbehring.ca](http://www.cslbehring.ca).

Distribué par le service d'Affaires médicale CSL Behring. Ces instructions ne sont pas destinées pour distribution externe.



D. G. Barnes MD  
Directeur Medical CSL Behring Canada