


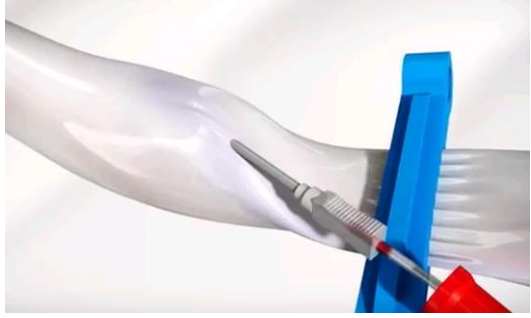
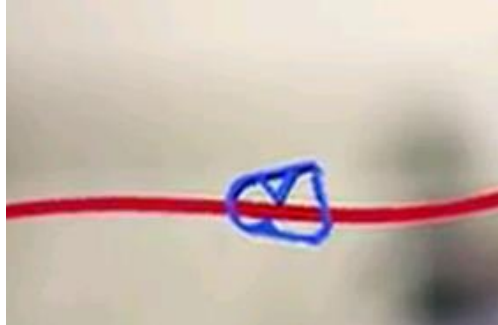




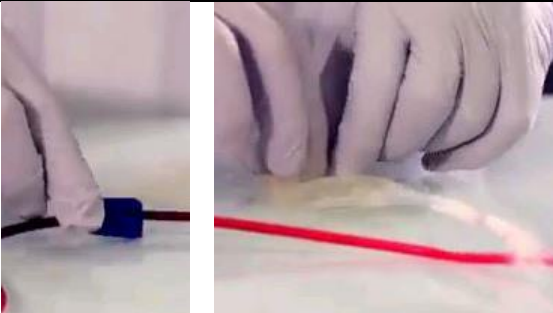




Pour copie papier seulement : Le document original est approuvé avec signature numérique sous la responsabilité de CFA.

<p><b>1</b> S'assurer que la mère ne présente aucun de signe d'infection ou de traces d'injection de drogues</p> 	<p><b>2</b> Fermer les 2 pinces bleues</p> 	<p><b>3</b> Désinfecter le cordon de façon unidirectionnelle</p> 
<p><b>4</b> Insérer l'aiguille dans la veine du cordon</p> 	<p><b>5</b> Ouvrir les 2 pinces bleues et abaisser le dispositif de collecte</p> 	<p><b>6</b> À la fin de l'écoulement, faire une traite du cordon («milking»)</p> 
<p><b>7</b> Fermer les 2 pinces bleues avant de retirer l'aiguille</p> 	<p><b>8</b> Relever et barrer le protecteur d'aiguille</p> 	<p><b>9</b> Casser la canule de la pochette d'anticoagulant</p> 
<p><b>10</b> Ouvrir la pince bleue proximale et enrouler la pochette d'anticoagulant sur elle-même</p> 	<p><b>11</b> Fermer la pince bleue proximale et la pince rouge permanente</p> 	<p><b>12</b> Signer le formulaire de collecte</p> 

Référence : PFN-00029

**LISTE DES MODIFICATIONS :**

SECTION	DESCRIPTION DU CHANGEMENT	JUSTIFICATION	PROVENANCE DE L'INFORMATION
11	Remplacement de l'image de la pince rouge	Mise à jour suite à son remplacement	CC-PRB-01341

Réf. CFA : OC-06161