



Produits sanguins
Cellules souches
Tissus humains

4045, boul. Côte-Vertu
Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7
Téléphone : 514 832-5000
Télécopieur : 514 832-1021

1070, avenue des Sciences-
de-la-Vie
Québec (Québec) G1V 5C3
Téléphone : 418 780-4362
Télécopieur : 418 780-2093

HQ-05-024

CIRCULAIRE

- TACHES SUR LES PRODUITS -

Le 21 juin 2005

**AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU CHEF TECHNOLOGISTE RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG**

Madame,
Monsieur,

Pour faire suite à des consultations auprès de l'AABB (organisme d'accréditation américain) ainsi que des établissements de sang membres de l'America's Blood Centers, et avec l'approbation de notre direction médicale, il est désormais décidé d'accepter la mise en inventaires des poches de composants labiles portant des traits d'encre de stylo sur le plastique, étant donné la très faible concentration d'encre et le court temps d'exposition.

En effet, aucune preuve n'a été faite démontrant que l'encre de stylo est nuisible au produit. Toutefois, cette directive ne s'applique pas aux traits de crayon feutre.

De plus, pour les dispositifs de thrombaphères, suite à des discussions avec le fournisseur Gambro, veuillez noter que toute présence de :

- taches et points de couleur verte, noire, brune ou toute autre couleur foncée
- tache d'encre de couleur jaune

sur ces poches est due au processus de fabrication ou matériau utilisé chez le fournisseur. Ces dispositifs sont donc conformes et peuvent être utilisés pour la transfusion.

En terminant, veuillez noter que les produits ayant une inscription manuelle au stylo (paraphe, date) sur l'étiquette conforme (dans l'espace au-dessus des résultats d'analyses) sont aussi acceptables, conformes et régis par nos procédures de fabrication normalisées.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information additionnelle.

Original signé par

Sylvie Thibault, T.M.
Directeur des relations avec les centres hospitaliers

c.c. M. Yvan Charbonneau, vice-président à l'exploitation
Dr Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales